

A-Detect™

COVID-19 Ταχεία

Δοκιμή αντιγόνου σάλιου

CE




Γρήγορη
Απλό
Προσιτή
Αποτελέσματα σε
15 λεπτά



A-Detect™ CE

Μέθοδος συλλογής δειγμάτων

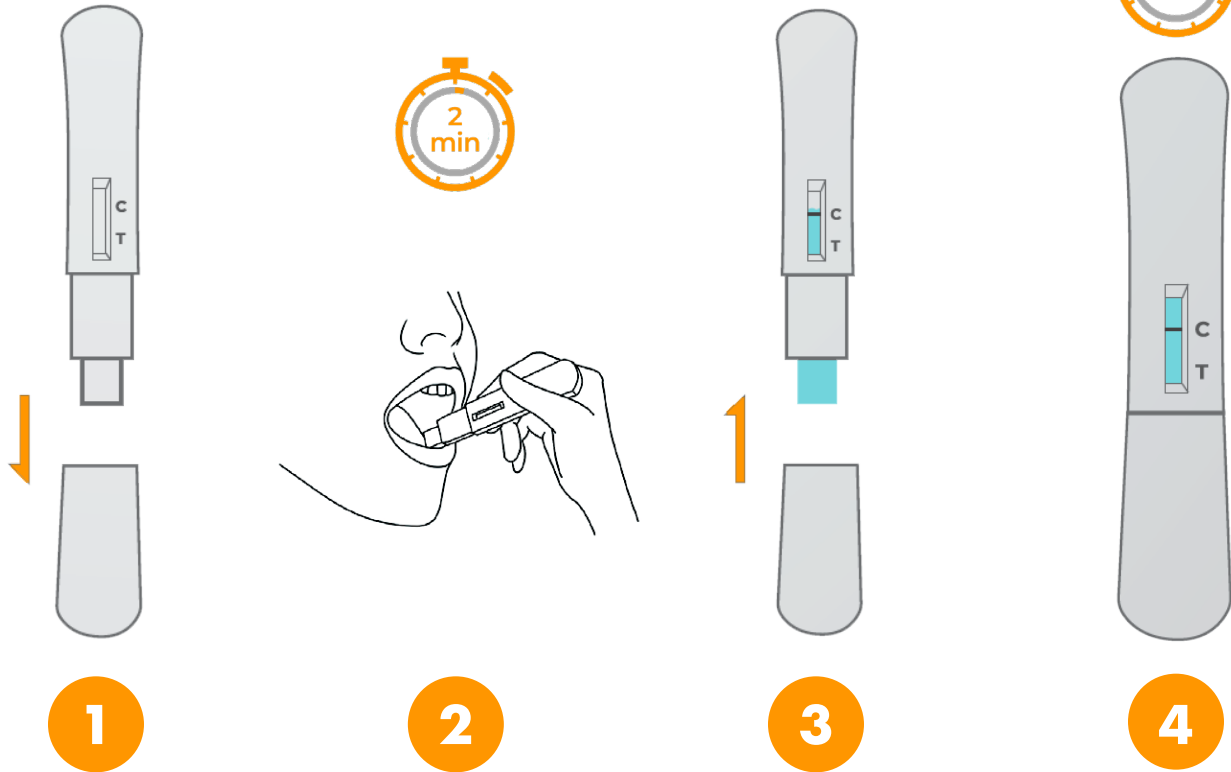

Αφαιρέστε τη συσκευασία από το κιτ δοκιμών και βγάλτε το καπάκι

Τοποθετήστε το απορροφητικό μάκτρο κάτω από τη γλώσσα για 2 λεπτά.

Μετά την αφαίρεση, κρατήστε το κιτ δοκιμής σε όρθια θέση (με το τμήμα του επιχρίσματος στραμμένο προς τα κάτω) και αφήστε το σάλιο να κινηθεί προς τα πάνω μέχρι να φτάσει ή να κινηθεί πάνω από τη γραμμή C. Ξαναβάλτε το καπάκι και τοποθετήστε το κιτ δοκιμής προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Μετά από 15 λεπτά, εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα σύμφωνα με το διάγραμμα αποτελεσμάτων της δοκιμής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του κιτ δοκιμών.



Οι συσκευές Edoceo είναι επίσημος διανομέας και στρατηγικός συνεργάτης με τη Ningbo Beautiful Life Medical Biotechnology Development Co., Ltd.